


TrachFlush Kurzanleitung



Scannen, um das Benutzerhandbuch herunterzuladen

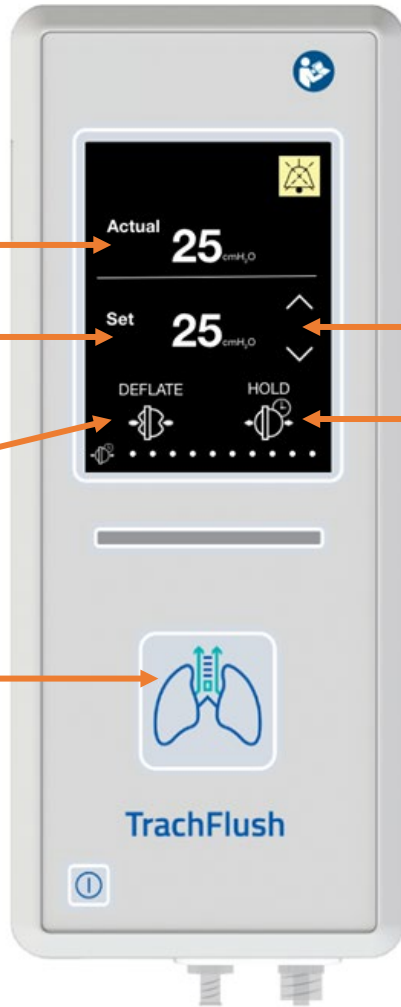

Aktueller
Manschettendruck

Manschettendruck
einstellen

Luft ablassen

Schnelles
Entleeren/Aufblasen

▲ (Manschettendruck erhöhen)

▼ (Manschettendruck senken)

Zeitlich begrenztes Halten

WARNUNGEN:

Nur bei Erwachsenen verwenden

Nicht in der Nähe von MRI verwenden


Nicht für den Transport geeignet

Nicht reinigen, wenn der Strom eingeschaltet ist


KONNEKTIVITÄT UND EINSCHALTEN



1 Verbinden Sie das Ende des CUFF TUBE mit der Buchse an der Unterseite des Geräts

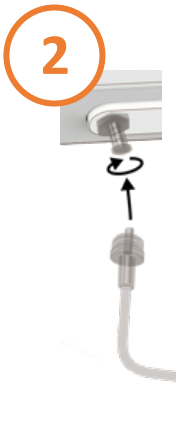

2 Verbinden Sie das Ende des AIRWAY TUBE mit dem Anschluss an der Unterseite des Geräts

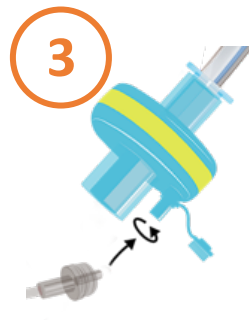

3 Verbinden Sie das andere Ende des AIRWAY TUBE mit dem HME-Filter oder mit einem Atemwegskonnektor des Atemwegssystems des Patienten.



4 Verbinden Sie das andere Ende des mit "CUFF" gekennzeichneten CUFF TUBE mit dem Cuff ETT/TT Ballonanschluss (Pilotballon)



5 Halten Sie die ON-Taste gedrückt, bis sich der Bildschirm einschaltet.

TrachFlush Kurzanleitung




CUFF DRUCK

ÜBERPRÜFEN



TATSÄCHLICHER
MANSCHETTENDRUCK

ERHÖHUNG

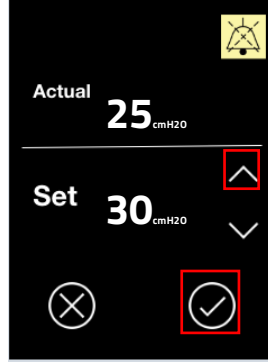

Presse zu ERHÖHEN

Presse Akzeptieren

VERRINGERN




Presse zu VERRINGERN


Presse Akzeptieren

ZEITLICH

BEGRENZTER HALT

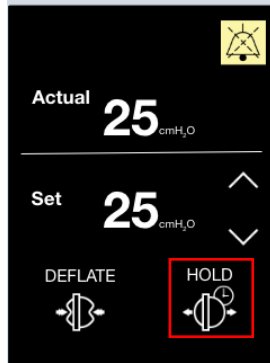

Presse zu aktivieren

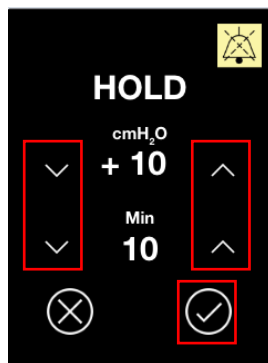

Presse um Einstellungen zu ändern und Akzeptieren

ALARME UND UNFORMATIONSSIGNALE



CUFF-Schlauch abgeklemmt

Manschettenanschluss prüfen



AIRWAY-Schlauch abgeklemmt

Atemwegsverbindung prüfen




CUFF-Leckage


Manschette und/oder Anschlüsse prüfen

SCHNELL

LUFT ABLASSEN /

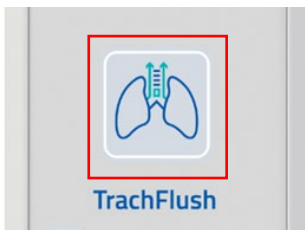

Drücken Sie die Taste
QUICK Deflate / Inflate

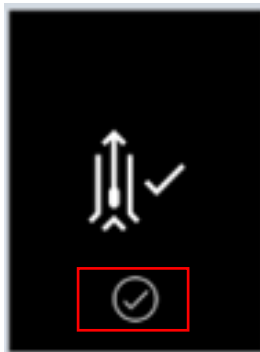


Presse die Taste

LUFT ABLASSEN



Presse zu aktivieren

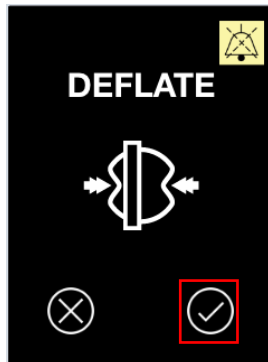

Presse Akzeptieren



CUFF über dem festgelegten

Grenzwert

Manschettendruck zu hoch



Benutzerabschaltung verweigert

Schläuche vom TrachFlush abtrennen